


Spoedstroom monstermateriaal

Meer informatie over de doorlooptijden en tarieven staat op onze website www.gddiergezondheid.nl of webshop www.gdwebshop.nl.

Met de ophaaldienst voor monstermateriaal kunnen onder andere dierenartsen-praktijken gratis diagnostische monsters insturen naar GD. Voor specifieke bepalingen kunt u een spoedaanvraag doen. U dient deze inzendingen te voorzien van een speciaal geel spoedetiket.

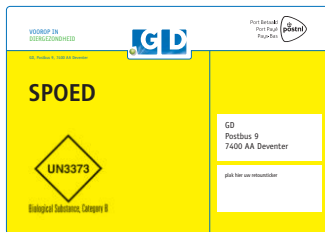

Voor alle labbepalingen gelden standaard doorlooptijden, maar voor specifieke bepalingen kunt u ook een spoedaanvraag doen. In deze gevallen dient u inzendingen, voor een tijdige verwerking en uitslag, te voorzien van een speciaal geel spoedetiket. Het spoedetiket stellen wij gratis ter beschikking via onze webshop (artikelnummer VDETI130). Voeg bij uw volgende bestelling dus de spoedetiketten toe, zodat u deze altijd bij de hand heeft. Meer weten? Vraag uw relatiebeheerder bij een volgend bezoek of ga naar www.gddiergezondheid.nl/spoed.

De spoedstroom geldt voor onderstaande producten.

Artikelnr	Productnaam
11336	PRRSv agens PCR (serum) pool 2-5 (spoed)
11337	PRRSv agens PCR (serum) (spoed)
11450	Salmonella typering door RIVM (spoed)
11452	Streptococcus equi pool 1-3 PCR (neusswab) spoed
11453	Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (neusswab) spoed
11455	Streptococcus equi pool 1-3 PCR (spoeling) spoed
11456	Streptococcus equi pool 1-3 PCR (abcesinhoud) spoed
11457	Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (EDTA) spoed
11458	Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR(aspiratie biopt)spoed
11459	Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (vaginaalswab) spoed
11496	Equine herpesvirus type 1 pool 1-3 PCR (weefsel) spoed
11550	PED virus agens PCR (faeces) (spoed)
11551	PED virus agens PCR (faeces) pool 2-3 (spoed)
11552	PED virus agens PCR (Eswab) (spoed)
11553	PED virus agens PCR (Eswab) pool 2-3 (spoed)
11565	BVD virus ELISA (serum) vanaf 1 maand spoed
11566	Leptospira hardjo antistoffen ELISA (serum) spoed
11567	Paratuberculose antistoffen ELISA (serum) spoed
11568	IBR gE antistoffen ELISA (serum) spoed
11569	IBR gB antistoffen ELISA (serum) spoed
11919	Equine influenza virus pool 1-3 PCR (neusswab) spoed

Verpakkingsinstructie diagnostisch monstermateriaal

ADR wetgeving

Het ADR is de internationale wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Voor GD heeft deze wet onder andere betrekking op het verpakken van diagnostische monsters. Vervoerder én opdrachtgever zijn hiervoor in dezelfde mate verantwoordelijk én aansprakelijk. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILeNT) is belast met het toezicht.

Indeling biologisch monstermateriaal

Biologisch monstermateriaal wordt ingedeeld in 2 categorieën:

- Categorie A: UN-nummers UN 2814 'Infectieuze stoffen, gevaarlijk voor mensen' en UN 2900 'Infectieuze stoffen, alleen gevaarlijk voor dieren'. Het gaat hierbij voornamelijk om culturen van ziekteverwekkers.

- Categorie B: al het diagnostisch materiaal dat niet in categorie A valt moet worden ingedeeld in UN 3373 'biologische stof, categorie B'.

Het meeste materiaal is categorie B materiaal. Als dit wordt vervoerd met verpakkingsinstructie P650, hoeft niet aan andere eisen van het ADR voldaan te worden.

Voor routine diagnostische monsters waarin zich naar alle waarschijnlijkheid géén infectieuze agentia bevinden, moet de verpakking breukvast en lekvrij zijn bij transport door een koerier of met eigen vervoer of taxi. Het hoeft niet te voldoen aan de hieronder beschreven specifieke eisen van P650. Voor diagnostische monsters die mogelijk infectieuze agentia kunnen bevatten en 'routine diagnostische monsters' die per post worden verstuurd, blijft P650 van toepassing.

Deze verpakkingsmaterialen zijn uit voorraad leverbaar:

Artikelnr	Productnaam
VDTRA106	Vouwdooasje voor 36 buisjes, incl. (10 stuks)
VDTRA117	Enveloppe diagnostisch materiaal A5 (50 stuks)
VDTRA159	Sealbag diagnostisch materiaal 16,5 x 26,5 cm (100 stuks)
VDTRA119	Absorptiemateriaal voor 3 buisjes (50 stuks)
VDTRA120	Enveloppe diagnostisch materiaal A4 (50 stuks)
VDTRA158	Sealbag diagnostisch materiaal 25,5 x 38,5 cm (100 stuks)
VDTRA122	Absorptiemateriaal voor 5 buisjes (50 stuks)
VDTRA157	Absorptievel 9 x 13cm (50 stuks)
VDTRA126	Sealbag 590 x 620 + handvat
VDTRA156	Absorptievel 20 x 30 cm (100 stuks)
VDTRA128	Doos golfkarton 201/A 280 x 280 x 150
VDET121	Etiket Diagnostic Specimens UN 3373
Histologisch onderzoek: Objectglasjes pathologie	
VDTRA136	Potje Pathologie 50 ml (met 30 ml formaldehyde)
VDTRA137	Potje Pathologie 100 ml (met 50 ml formaldehyde)
VDTRA138	Potje Pathologie 400 ml (met 200 ml formaldehyde)
VDTRA139	Potje Pathologie 1000 ml (met 500 ml formaldehyde)
VDTRA140	Potje Pathologie 2500 ml (met 1250 ml formaldehyde)
Cytologisch onderzoek: Objectglasjes + verzendmateriaal	
VDTRA131	Container verzend voor 2 objectglasjes
VDTRA159	Sealbag diagnostisch materiaal 16,5 x 26,5 cm (100 stuks)
VDTRA157	Absorptievel 9 x 13 cm (50 stuks)
VDTRA117	Enveloppe diagnostisch materiaal A5 (50 stuks)

Verpakkingsinstructie P650

Het monstermateriaal dat naar GD wordt verzonden valt doorgaans binnen categorie B. Zo niet, dan graag contact opnemen met GD telefoonnummer 0900-202 0012.

Hieronder de instructie voor biologische stoffen categorie B:

- De verpakking moet van goede kwaliteit zijn om verlies van inhoud door vervoersomstandigheden te voorkomen.
- De verpakking bestaat uit drie lagen, waarvan de tweede of derde laag stijf moet zijn.
- De eerste verpakking moet zo zijn verpakt in de tweede zodat deze niet kan breken. De tweede verpakking moet (met opvulmateriaal) zijn vastgezet in de derde verpakking. Bij lekkage mag dit niet te zien zijn aan het eventuele opvulmateriaal of de derde verpakking.
- Het kenmerk UN 3373 (50x50mm) moet op de buitenzijde staan, evenals het opschrift 'biologische stof categorie B' nabij het kenmerk.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Vervoers informatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport, telefoon 088-4890000 of www.ilent.nl.



Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl