

Instructies QuickScan Biestmanagement

Met de QuickScan Biestmanagement krijgt u inzicht in de biestkwaliteit van uw zeugen en de biestopname door hun pasgeboren biggen. Om de biestkwaliteit te kunnen onderzoeken, zijn biestmonsters nodig. Deze kunt u zelf nemen. Om inzicht te krijgen in de biestopname, neemt uw dierenarts bloedmonsters van vijf biggen per zeug. Hieronder vindt u alle instructies.

Biest verzamelen

1. Neem het biestmonster binnen 4 uur na de geboorte van de eerste big.
2. Gebruik één buis per zeug.
3. Verzamel biest van minimaal drie spenen en meng dit in één buis.
4. Er is minimaal 2 milliliter biest nodig.
5. Identificeer de buis met het zeugnummer.
6. Bewaar het biestmonster in de koeling, tot vlak voor de verzending.

Bloedmonsters nemen

1. Uw dierenarts neemt de bloedmonsters bij de biggen van dezelfde zeugen als waar u de biest van heeft verzameld.
2. Er zijn bloedmonsters nodig van vijf biggen per zeug.
3. Uw dierenarts neemt de bloedmonsters als de biggen ongeveer 2 dagen oud zijn.
4. Er is minimaal 2 milliliter bloed per big nodig.
5. Selecteer uitsluitend biggen die geboren zijn bij de zeug en niet overgelegd zijn.

Identificatie van de monsters

1. Gebruik de stickers die GD heeft meegeleverd.
2. Plak sticker Zeug A op het biestmonster en plak sticker Big A1, Big A2, enzovoorts op de bijbehorende bloedmonsters van de biggen.
3. Zorg dat de monsters van de biggen en de zeugen met elkaar corresponderen.



De uitslag

U ontvangt de uitslag van alle monsters binnen 3 werkdagen na ontvangst door GD.

Daarnaast ontvangt u een rapportage QuickScan Biestmanagement binnen 5 werkdagen na ontvangst door GD.