

Onderzoeken

ELISA

PCR



3*

3*



3*

3*



3*

3* Per inzending wordt standaard 1 monster (meest positieve) gesequenced

1. Plaats het touw boven het hok op schouderhoogte van de varkens. Zorg ervoor dat het touw stevig vastzit. Verwijder het tape aan het begin en eind van het touw. Laat de varkens 20 tot 30 minuten op het touw kauwen.
2. Trek handschoenen aan, pak het touw en plaats het in de zak. Pers het speeksel uit het touw door er stevig in te knijpen of het te strippen. Verzamel minimaal 3 milliliter speeksel.
3. Verwijder de buis van de zak en sluit de buis goed af. Plak de meegeleverde sticker op de buis en vermeld de identificatie op de sticker. U kunt het monster digitaal inschrijven of het inzendformulier downloaden.