

Insturen monstermateriaal slachtlijn



GD LOOPT VOOROP IN DIERGEZONDHEID
MET ONZE GRATIS OPHAALDIENST VOOR MONSTERMATERIAAL



Eenvoudig digitaal aanmelden

1. Overdag verzamelen van monstermateriaal.
2. Monsters digitaal aanmelden voor 18:00.
3. Monstermateriaal inpakken voor 18.00 uur en in kast plaatsen.
4. PS Nachtdistributie haalt monstermateriaal op en levert dit af bij GD.
5. Volg uw zending met track & trace.
6. Ontvangst laboratoriumuitslag per e-mail.

De meeste slachthuizen zenden bloedbuizen in via de post. Hiervoor dient u speciaal verpakkingsmateriaal te gebruiken omdat bloed gezien wordt als diagnostisch materiaal. Stuurt u frequent grote hoeveelheden monsters in naar GD, dan kunt u gebruikmaken van onze *Ophaaldienst voor monstermateriaal*. Onze ophaaldienst haalt diagnostische monstermateriaal op bij klanten en levert deze af bij GD. PS Nachtdistributie is uitvoerder. Frequente inzenders van monstermateriaal kunnen gratis gebruikmaken van deze ophaaldienst.

Verpakkingsinstructie diagnostische monsters

Voor het betrouwbaar en veilig kunnen vervoeren van monstermateriaal moet de verpakking voldoen aan bepaalde eisen. Dit is ook wettelijk vastgelegd in het ADR, een Europese wet die het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen beschrijft. Het Nederlandse toezicht hierop wordt geregeld door de *Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)*.

De inzender is verantwoordelijk voor het juist verpakken van het te verzenden materiaal. GD kan ondersteunen bij het verstrekken van goedgekeurd verpakkingsmateriaal.

Indeling biologisch monstermateriaal

Biologisch monstermateriaal wordt ingedeeld in twee categorieën:

- Categorie A: UN-nummers UN2814 'Infectieuze stoffen, gevaarlijk voor mensen' en UN2900 'Infectieuze stoffen, alleen gevaarlijk voor dieren'. Het gaat hierbij voornamelijk om culturen van ziekteverwekkers.
- Categorie B: al het diagnostisch materiaal dat niet in categorie A valt moet worden ingedeeld in UN3373 'biologische stof, categorie B'. Het meeste materiaal is categorie B materiaal. Als dit wordt vervoerd aan de hand van de verpakkingsinstructie P650, hoeft niet aan andere eisen van het ADR voldaan te worden.

Het monstermateriaal dat u naar GD stuurt valt doorgaans binnen categorie B. Zo niet, dan graag contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 20 25 500.



Verpakkingsinstructie biologische stoffen categorie B

1. Plaats na monsternamen de bloedbuizen in de koelkast

De monsters dient u binnen een week aan te leveren bij GD en tot die tijd koel te bewaren.

2. Verpak de monsters en omwikkel met absorberend materiaal

Verpak het monstermateriaal in een geschikte houder (buisje of potje). Als u meerdere monsters opstuurt moeten deze afzonderlijk verpakt worden om contact tussen de monsters te voorkomen. Om lekkage te voorkomen moet elke primaire verpakking worden omwikkeld met absorberend materiaal.

3. Plaats de monsters in een sealbag met opvulmateriaal

Plaats de omwikkelde monsters in een sealbag met opvulmateriaal. De eerste verpakking moet zo zijn verpakt in de tweede zodat deze niet kan breken. Zorg dus voor voldoende opvulmateriaal.

4. Verstuur de sealbag met inzendformulier in een stijve verpakking


Verpak de sealbag met een inzendformulier in een stijve verpakking. Omwikkel de sealbag met karton als deze in een envelop wordt vervoerd. Zo kunnen de monsters niet breken tijdens transport. Voeg maximaal één inzendformulier toe per verpakking. Plak het verzendlabel bovenop de doos of envelop. Zorg ervoor dat het opschrift 'UN3373' en 'biologische stof categorie B' evenals het opschrift zichtbaar blijft.



Verpakkingsinstructie biologische stoffen categorie A (P620)

Het monstermateriaal dat naar GD wordt verzonden valt doorgaans binnen categorie B. Op voorhand is niet bekend of en welk agens het monstermateriaal bevat. Daarom worden de bij GD ontvangen monsters met grote voorzichtigheid behandeld en uitgepakt GD.

Bij vermoedens van de aanwezigheid van een meldingsplichtige dierziekte en inzendingen van losse culturen naar GD worden hogere eisen aan de verpakking gesteld. Dit betekent dat ook andere onderdelen uit het ADR van toepassing zijn. Wat dit voor u betekent, kunt u vinden op onze website bij de '[Verpakkingsinstructie biologische stoffen categorie A \(P620\)](#)'.

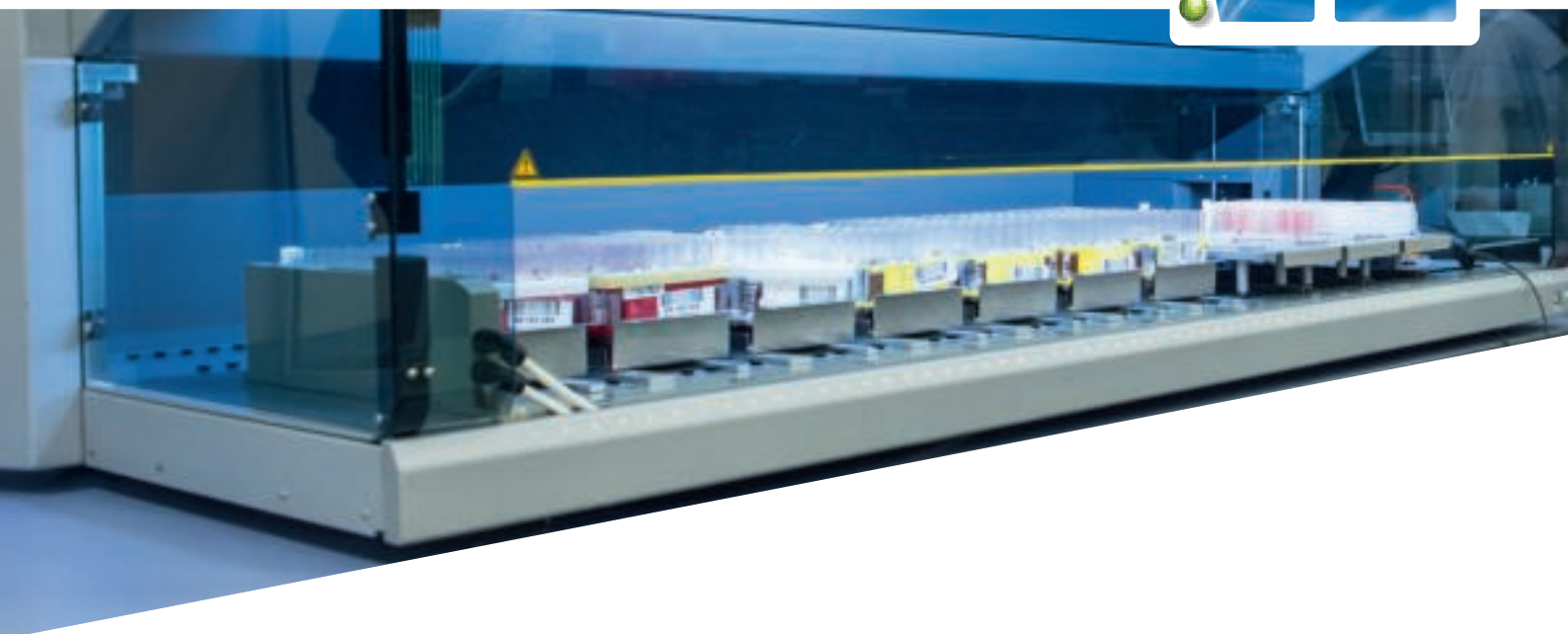

Verpakkingsmaterialen slachthuizen

GD voorziet slachterijen van onderstaande monsternamematerialen voor de verzending van bloedmonsters conform de verpakkingsinstructie P650 en ADR UN3373. U kunt de verpakkingsmaterialen bestellen via www.gdwebshop.nl of telefonisch via 088 20 25 500.

Bestellen kan via
www.gdwebshop.nl

Artikelnr	Productnaam
VDBUI167	Nieuwe slachtlijnbuis Runderen
VDETI121	Etiket Diagnostic Specimens UN 3373
VDETI124	Etiket met antwoordnummer GD
VDTRA106	Doos voor het verzenden van monstermateriaal
VDTRA120	Envelop voor het inzenden van monstermateriaal
VDTRA122	Verpakkingsmateriaal voor het verzenden van monstermateriaal
VDTRA126	Zak voor het verzenden van monstermateriaal
VDTRA128	Doos voor het verzenden van monstermateriaal
VDTRA156	Verpakkingsmateriaal voor het verzenden van monstermateriaal
VDTRA158	Zak voor het verzenden van monstermateriaal (A4 formaat)



Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl/
ophaaldienst-monstermateriaal