


Aandachtspunten bij het insturen van oorbiopten

Steeds meer veehouders ontdekken het gemak van oorbiopten. Let op de volgende punten om er zeker van te zijn dat uw oorbiopt goed bij GD aankomt én dat GD het biopt snel kan identificeren en koppelen aan uw bedrijf. Zo ontvangt u altijd een uitslag en worden geen kalveren 'gemist'.

Tip 1. Druk het kokertje goed dicht

Druk nadat u het biopt hebt genomen, het kokertje goed over de naald. Zo beschermt u het biopt en blijft duidelijk bij welk kalf het biopt hoort. Op het kokertje staat namelijk het levensnummer.

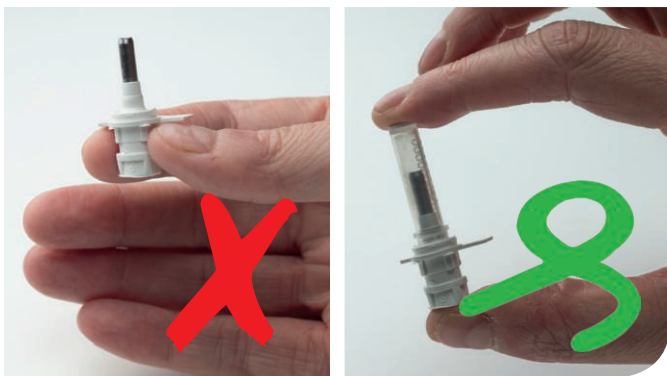


Tip 2. Gebruik GD-verpakkingsmateriaal

Als uw oormerkleverancier geen verpakkings- en verzendmateriaal van GD meeleverd, kunt u dit materiaal bestellen in de GD Webshop (code VDGE082 voor biopten zonder vloeistof, code VDGE083 voor oorbiopten met vloeistof). Gebruik altijd de blauwe safetybag (zie afbeelding). Gebruik geen andere safetybags en stop de kokertjes nooit los in een envelop.




Tip 3. Eerst inschrijven daarna insturen

Schrijf de oorbiopten altijd in. Doe dit óf digitaal via VeeOnline, óf met een inzendformulier (kies één van beide opties; doe niet beide). Als u digitaal inschrijft, volg dan nauwgezet de handleiding en vergeet aan het eind niet op 'verzenden' te klikken. Schrijf eerst in en verstuur daarna pas uw oorbiopten. **Komen de oorbiopten zonder inschrijving bij GD binnen, dan ontvangt u geen uitslag. Dit heeft gevolgen voor uw BVD-status.**

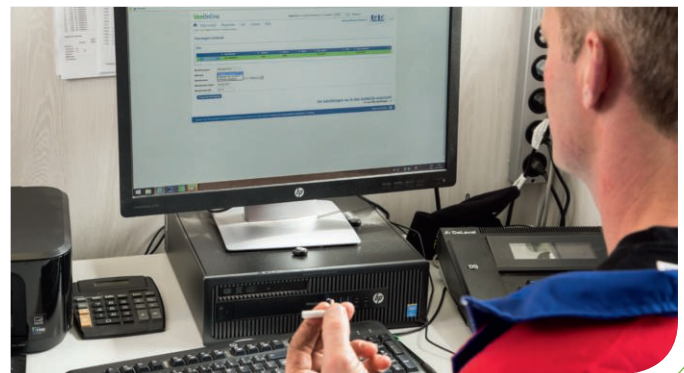

Tip 4. Kies mét of zónder vloeistof

Geef bij het inschrijven op de aangegeven plek goed aan of u oorbiopten mét of zonder conserveringsvloeistof instuurt. Hebt u kokertjes met conserveringsvloeistof, laat dit er dan niet uitlopen.

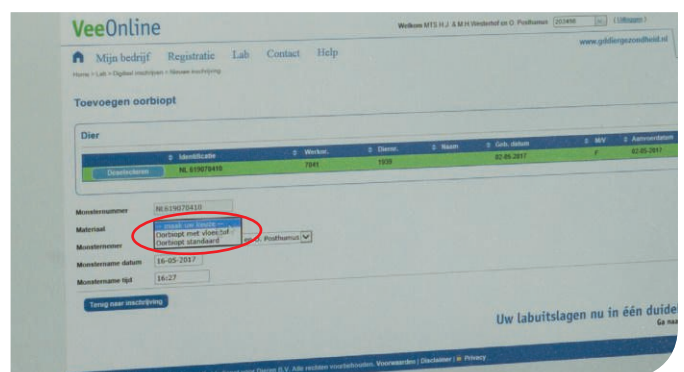

Tip 5. Gebruik het volledige levensnummer

Schrijf kalveren die levend geboren worden altijd in met het volledige levensnummer. Tijdens het digitaal inschrijven klikt u dit nummer aan in uw stallingst. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat het kalf is aangemeld bij I&R en dat het kalf nog op uw bedrijf aanwezig is.



Tip 6. Neemt u 2 oorbiopten per kalf? Stuur er 1 naar GD

Als u met een systeem werkt waarbij u uit beide oren van het kalf een oorbiopt neemt, hoeft u maar één van beide buisjes naar GD te sturen. Bewaar het andere in de koelkast totdat de uitslag bekend is, voor het geval een nieuw monster nodig is.

Tip 7. Alles van één inschrijving in één envelop

Hebt u meerdere oorbiopten digitaal ingeschreven? Doe deze oorbiopten dan bij elkaar in één envelop; verstuur ze niet in verschillende zendingen naar GD.



Doodgeboren kalveren

Wilt u doodgeboren kalveren of verworpen vruchten laten onderzoeken op BVD-virus? Gebruik hiervoor dan oormerken zónder levensnummer. U kunt deze bestellen in de GD-webshop (VDTRA160 of VDGEBO84). In dit pakket zit ook het juiste inzendmateriaal. Oorbiopten van doodgeboren kalveren worden op een andere manier ingeschreven dan die van levende kalveren. Volg de handleiding "Inschrijven oorbiopten doodgeboren kalveren".

Deze zit in het pakket en is ook te vinden via www.gddiergezondheid.nl/veeonlinebund

