

Rotkreupel Check Gezonde klauwen



GD LOOPT VOOROP IN DIERGEZONDHEID
MET DE CHECKLIJN SCHAAP GEIT



Met de Rotkreupel Check onderzoekt u op een eenvoudige manier of de bacterie *Dichelobacter nodosus* speelt op uw bedrijf. Rotkreupel is een lastig te behandelen aandoening, die een zorgvuldige aanpak vereist.

Rotkreupel is een vervelende besmettelijke tussenklauw-huidaandoening die zorgt voor groeivertraging en verhoogd antibioticagebruik. Bovendien tast een infectie het dierwelzijn aan. De aandoening rotkreupel wordt regelmatig vermoed, maar de diagnose wordt meestal niet gesteld. GD heeft recent een test ontwikkeld die de aanwezigheid van de rotkreupelbacterie, *Dichelobacter nodosus*, aantoont op uw bedrijf. Daarna kunt u de bacterie gericht bestrijden.



Uitbraak rotkreupel: “Je wilt zo snel mogelijk actie”

Met pijn in haar buik liep Sylvia Boshuizen-Galesloot de wei in. ‘Het zal toch niet’, dacht ze. Haar ooien liepen mank en het zag er niet goed uit. “Wat door mijn hoofd schoot, werd door de dierenarts bevestigd: rotkreupel.” Daarom is ze samen met dierenarts Hans Gorter direct om tafel gaan zitten. “We hebben toen besloten om, samen met GD, een plan van aanpak te maken. Lees de hele aanpak op www.gddiergezondheid.nl/rotkreupelcheck

Hoe werkt de Rotkreupel Check?

Bestellen

U meldt zich aan via www.gddiergezondheid.nl/rotkreupel voor het abonnement Rotkreupel Check en ontvangt een pakket met monster- en verzendmateriaal. De check is een abonnement dat u jaarlijks kunt opzeggen.

Bemonsteren


U mag de monsters zelf nemen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om uw dierenarts de monsters te laten nemen. Neem bij de monsternamen hygiëne-maatregelen in acht: gebruik handschoenen en was uw handen na monsternamen. Er zijn twintig swabs nodig op bedrijven met meer dan twintig dieren (groot pakket) en tien swabs op bedrijven met minder dan twintig dieren (klein pakket). Als u de monsters heeft verzameld en het inzendformulier correct heeft ingevuld, kunt u of uw dierenarts het verzamelpakket terugsturen naar GD.

Laboratorium GD

De monsters worden per bedrijf gepoold onderzocht: één pool bij het kleine pakket en twee pools bij het grote pakket.

Uitslag

GD stuurt u en uw dierenarts de uitslag toe. Naar aanleiding van de uitslag kunt u contact opnemen met uw dierenarts. Uiteraard kunt u ook vrijblijvend een gericht advies vragen bij GD via 0900-1770 optie 3 schaaap geit.

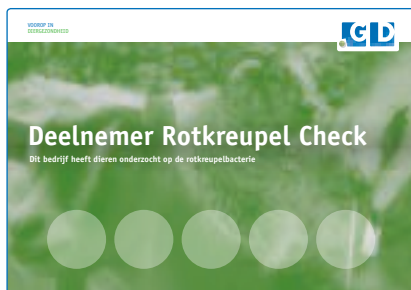

Rotkreupel Check

- Inzicht in voorkomen rotkreupelbacterie
- Eenvoudig te bemonsteren
- Gericht actie
- Extra advies mogelijk



Bestellen Rotkreupel Check

Er zijn twee abonnementen verkrijgbaar. Afhankelijk van het aantal dieren op uw bedrijf maakt u hierin een keuze. De check is een doorlopend abonnement, dat u jaarlijks kunt opzeggen.

- Klein pakket met 10 swabs voor bedrijven met minder dan 20 schapen en/of geiten*.
- Groot pakket met 20 swabs voor bedrijven met meer dan 20 schapen en/of geiten*.

Wilt u meer weten of u aanmelden?

Ga naar onze website www.gddiergezondheid.nl/rotkreupel of neem contact op via 0900-1770 optie 3, elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

* De Rotkreupel Check is inclusief monsternamepakket, verzendmateriaal, laboratoriumonderzoek en een Rotkreupel Check bordje.



Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl/rotkreupel